



**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

## Apical Wurzelheber · Root Elevator Fig. 77 R / Fig. 77

REF 614-30 / REF 614-31




Aufgrund der Biegung des Instrumentes ist ein sehr guter Zugang am Approximalkontakt zum 8er Zahn in allen Quadranten möglich. Die feine, gezahnte Spitze erlaubt ein schonendes Luxieren.

The bend of the instrument allows an excellent access on the approximal contact to root no. 8 in all quadrants. The fine serrated tip allows a gentle luxation.



Die feine Maulrandzahnung stellt sicher, dass der Zahn beim Luxieren nicht vom Instrument abgleitet.

The fine serrated edges assure that the tooth will not slide from the instrument during luxation.

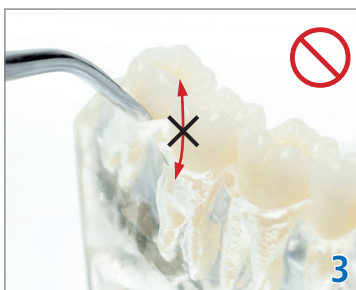

**Achtung!** Es ist nicht vorgesehen, diese Instrumente hebelnd einzusetzen, wie es z. B. auf der Abbildung 3 zu sehen ist.

**Attention!** It is not foreseen, to use the instrument as lever, as shown on the picture 3 or in any other way.



**Achtung!** Bitte vermeiden Sie die punktuelle Überbelastung des Instruments auf der absoluten Spitze. Dies kann zum Ausbrechen des Arbeitsendes führen.

**Attention!** Please avoid any punctual over stressing of the instrument on its absolute tip, as the working tip might break off.

Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir leider keine Haftung übernehmen.

We unfortunately cannot assume any liability for damages caused by improper use of the instruments.

**614-30**

FIG. 77R



**614-31**

FIG. 77

